

NEU



# Proprio Karpal- Bandage

Die DILECTUS Proprio-Bandage mit einer robusten Webstruktur überzeugt durch ihre bemerkenswerte Dehnfähigkeit von etwa 200 %. Dies macht sie besonders geeignet für Stützverbände, Entlastungsverbände und Kompressionsverbände. Die komprimierende Wirkung erzeugt propriozeptive Reize, die sich äußerst positiv auf den Bewegungsablauf und die Therapie auswirken. Die Kompression lässt sich individuell anpassen, indem Sie die Wicklung leichter oder straffer gestalten. Aufgrund ihrer hohen Elastizität passt sich die Bandage hervorragend an die Gliedmaßen an und bietet sowohl der Haut als auch der Muskulatur eine kontinuierliche, sanfte Massage.

## Anwendungsgebiete:

- **Therapie**
- **Erkrankungen des Band- und Halteapparates**
- **Prävention**

## Besondere Merkmale:

- **Hautfreundlich:** Die Bandage ist besonders sanft zur Haut.
- **Atmungsaktiv:** Dank ihrer Eigenschaften kann die Haut unter der Bandage atmen.
- **Formstabil:** Die Bandage behält ihre Form, ohne einzuschneiden.
- **Langanhaltender Tragekomfort:** Sie bietet lang anhaltenden Tragekomfort, ohne unangenehme Druckstellen zu verursachen.
- **Starker Halt für effektive Unterstützung:** Die Bandage bietet einen kräftigen Zug, um eine ausgezeichnete Stützwirkung zu gewährleisten.
- **Wasch- und dampfsterilisierbar:** Die Bandage kann einfach gereinigt und sterilisiert werden.

## Material:

- Hergestellt aus 100 % Baumwolle mit eingewebten, umspinnenen Gummifäden. Klett Viskose und Polyamid.

## Ausführung:

- Höhe 10cm, 6cm, 4cm

## Preis:

- 1 Paar 56,00 EUR

## Anwendung:

Wickeln Sie die Proprio-Bandage mit leichtem Zug um das Karpalgelenk Ihres Hundes. Achten Sie darauf, mindestens 1 cm Abstand zum Pfotenrücken zu halten, um Druck auf die Pfotenrücken zu vermeiden. Je straffer die Wicklung, desto mehr Unterstützung wird erzielt. Vermeiden Sie jedoch, die Bandage mit vollständiger Dehnung des Materials anzubringen, da dies die Wirksamkeit beeinträchtigen kann. Überwachen Sie während der Anwendung, dass keine Druckstellen entstehen und die Pfote nicht anschwillt. Entfernen Sie die Proprio-Bandagen in Ruhephasen.



DILECTUS Orthopädietechnik für Tiere  
Carl-Zeiss-Str. 42  
47445 Moers



Telefon: 02841 - 999 69 81  
Email: [info@dilectus.de](mailto:info@dilectus.de)  
Internet: [www.dilectus.de](http://www.dilectus.de)